

Technisches Datenblatt

Produktname	Schutzmaske
Produktspezifikation	1 Stück / Beutel, 10 Stück / Box
Modell	T8000
Maße	16cm x10,5cm
Produktstandard	EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

Produkt Beschreibung	<p>Das Produkt bietet Atemschutz mit selbstansaugendem Filter für Nicht-Öl-Schmutzpartikel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geprüft und CE-zertifiziert nach EN 149: 2001 + A1: 2009 - Flacher Ohrhaken Typ mit Nasenclip und Doppelriemen - FFP2 NR
Materialzusammensetzung	Das Produkt besteht aus fünf Schichten: Außenschicht aus Vliesstoff, mittlere Schichten aus einer Doppelschicht Schmelzgeblasenem Vlies und einer Schicht Heißluftbaumwolle, Innenschicht aus Vliesstoff.
Lagerbedingungen	Das Produkt muss bei - 30 ° C bis + 70 ° C Umgebungstemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80%, ohne korrosivem Gas, fern von Feuerquellen und brennbaren Substanzen, gelagert werden.

Gebrauchsanweisung

- 1.) Öffnen Sie die Maske auf der Seite ohne Nasenclip, sodass sich der Nasenclip über der Maske befindet.
- 2.) Mit den Händen jeweils eine Seite des Ohrbands nehmen und Maske gegen das Kinn halten;
- 3.) Um das Ohrband hinter dem Ohr aufzuhängen, stellen Sie das Ohrband so ein, dass es sich so angenehm wie möglich anfühlt.
- 4.) Drücken Sie mit zwei Fingern in die Mitte des Metallnasenclips, um es an Ihre Nasenform anzupassen. Nur so kann die Sicherheit der Maske gewährleistet werden.
5. Vor dem Betreten des Arbeitsbereichs muss die Dichtheit der Maske auf dem Gesicht überprüft werden.



Warnhinweise

1. Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Einschränkungen der Verwendung kann die Wirksamkeit dieser Partikelfilter-Halbmaske erheblich beeinträchtigen und zu Krankheit, Verletzung oder Tod führen.
2. Der Benutzer sollte die Partikelfilter-Halbmaske gemäß den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen auszuwählen und entsprechend verwenden.
3. Bitte in Umgebungen mit ausreichendem Sauerstoffgehalt und guter Belüftung verwenden.
4. Nehmen Sie keine Änderungen an der Partikelfilter-Halbmaske vor. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Sitz der Partikelfilter-Halbmaske.
5. Die Verwendung einer Partikelfilter-Halbmaske auf Gesichtsbehaarung kann eine gute Passform verhindern. Unter diesen Umständen kann der Schutz nicht gewährleistet werden.
6. Verlassen Sie den kontaminierten Bereich, wenn Schwindel, Reizungen oder andere Krankheitserscheinungen auftreten.
7. Entsorgen Sie die Partikelfilter-Halbmaske und ersetzen Sie sie durch eine neue, wenn: a.) Atembeschwerden aufgrund eines erhöhten Atemwiderstands auftreten. b.) Die Partikelfilter-Halbmaske beschädigt oder deformiert wird. c.) Eine korrekte Gesichtsanpassung nicht gewährleistet werden kann.
8. Ein richtig ausgewähltes Atemschutzprodukt ist wichtig, um Ihre Gesundheit zu schützen. Bevor Sie dieses Atemschutzprodukt verwenden, konsultieren Sie einen geeigneten Experten.